

EpiMED_LED (最新型 LED 脱毛)



最先端 & 高性能 LED+Elight 脱毛器

EpiMED_LED のご紹介



お夢を照らします！

LaserTell について

レーザーテル社は、2012 年から日本の脱毛機市場を研究し、2014 年から日本国内でも有数のエージェント（トップ 5）と提携しました。

2017 年から自社エステサロンの運営を開始し、機器の性能、耐久性を実際に確認した後年、2019 年から美容機器の販売を拡大しました。

私たちの製品は医学の CE 承認と米国の FDA 証明書を獲得し、ISO13485 と 93/42/EEC 規格に従って、全体の生産過程があります。

“高品質・高性能” が成功の方程式。

LaserTell の ODM 業務用脱毛機・美容機器は時代のニーズに先駆けた次世代の製品をラインナップ。

業務用エステ機器日本国内トップクラスの売上を誇る「B**」から脱毛機が発売！


株式会社 LaserTell では、新たに業務用 LED 脱毛機を発売。医療用・エステ用…数多ある脱毛機の業界のレッドオーシャンに自ら飛び込む、その自信の理由とは一。

「痛くない HS-PCT」としての技術に応用し作られた“HS-PCT”でマシン業界に驚きと革新をもたらせた株式会社 LaserTell が、「儲かる脱毛を可能に」をコンセプトに脱毛機を発売。

EpiMED_LED

最先端テクノロジー: **HS-PCT™** (高速予冷却技術)

より速く,
よりスマートに!

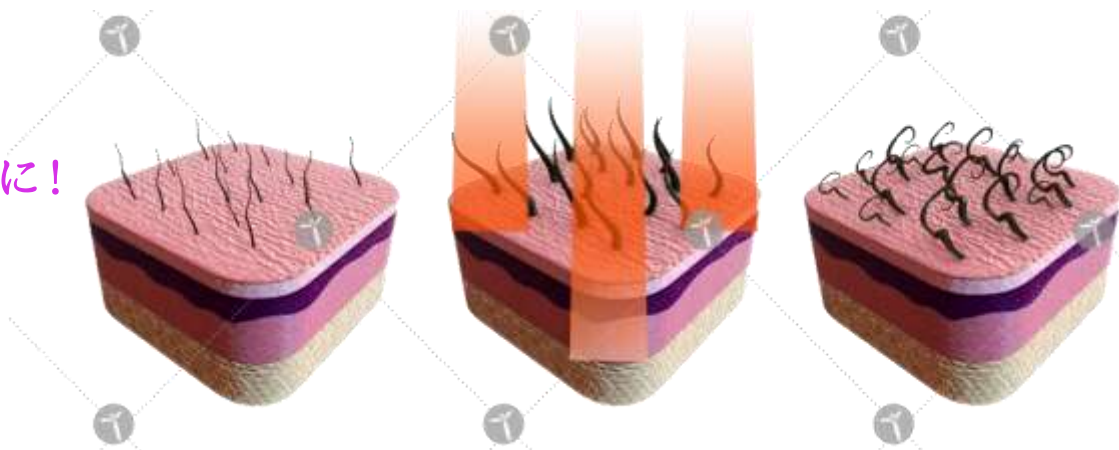

EpiMED_LED は、すべての肌と髪タイプの安全で効果的な脱毛を提供することが臨床的に証明されており、最速の LED プラットフォームです。

「新しい脱毛法」
脱毛を、もっと楽しく快適に

1. LED はどのように機能しますか?

より長い波長が表皮の奥まで届くため、医療レーザーと同様に確実な脱毛効果が得られますが、低発熱かつ強力な冷却機能がついているので、痛みが少ないのが特徴です。医療レーザーの良いところ取りができる脱毛法です。



LEDなら
医療用とIPL脱毛の良いところ取り

LED脱毛

低発熱で、痛みが少なく
奥までしっかりアプローチし効果を発揮

「新感覚」の次世代型

脱毛法がさらにパワーアップ!

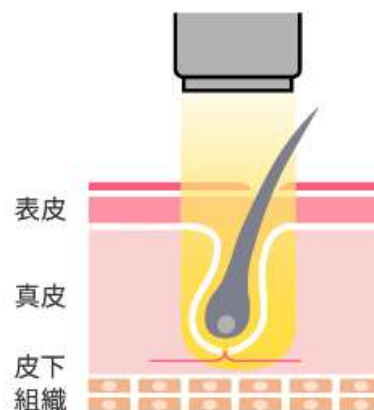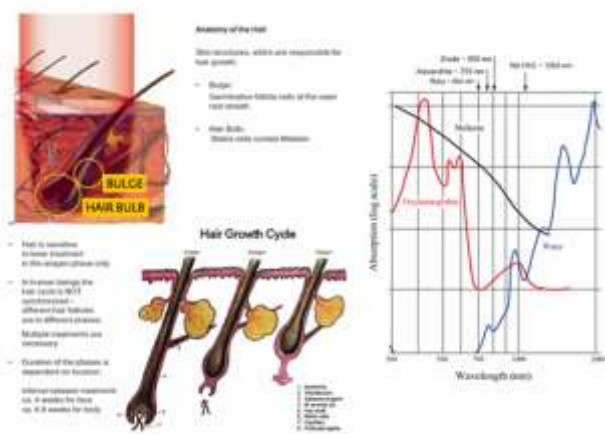

2. 異次元の冷却!

- *バルジ域までやさしく安全にやさしく熱を届ける
- *異次元の冷却



- *最低照射面温度「-15.8℃」を記録!
また、EpiMED_LED は 1 度以下の安定した温度をお手入れ中もキープします。
- *痛みを抑える冷却機能
「ハイパークール」機構
「冷たさが持続」する
- *強力な接触冷却テクノロジーが
脱毛が楽しくなる!

• 痛みがない

- *痛い、眩しい、終わらない施術に終止符を
- *痛みを抑えて顧客満足度を最大化!

3. 本物の LED と ダイオードレーザー



本物の LED

VS.



これは本物のダイオードレーザー

4. 優れた機能 (LED)

複合型脱毛

- 最新技術 LED
- 自動認識ハンドル
- エネルギー矯正 (エネルギーメーターによる)

違点	画像	他社	EpiMED_LED	利点
エネルギー校正ソフトウェア		使用できない	使用可能 	工場モードでのエネルギー校正設定。
しゅうはすう		1-3Hz	1-15Hz	これにより、操作を高速化し、治療時間を短縮することができます。
ウォーターロック継手		使用できない	使用可能	水錠付き治療ヘッドコネクタ 治療ヘッドの使用が1つでも許可されている場合でも、交換が容易です。

4.1 自動認識ハンドル (LED)

- 発射数をコントロールする最新技術「iButton」をハンドピースにアップデートしました。ハンドピースをマシンに接続すると、すべてのショットが自動的に認識されます。

- 米国 Coherent 製 LED

寿命: 20,000,000 パルス/ショット



5. EpiMED_LED ディスプレイのハイライト:

導入後の操作や設定は非常に簡単でわかりやすい!

視認性とわかりやすさを重視した
タッチパネル操作画面!



言語を選択します

英語、スペイン語、ロシア語、日本語が含まれています


UI インタフェース



操作画面




セクター柄メニュー

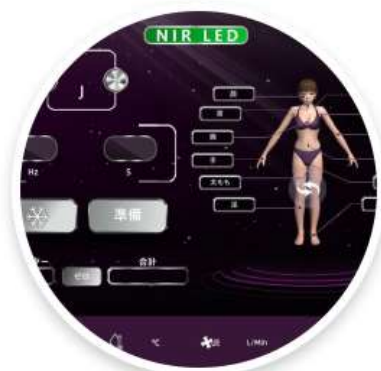

LED-未動作モード



LED動作モード

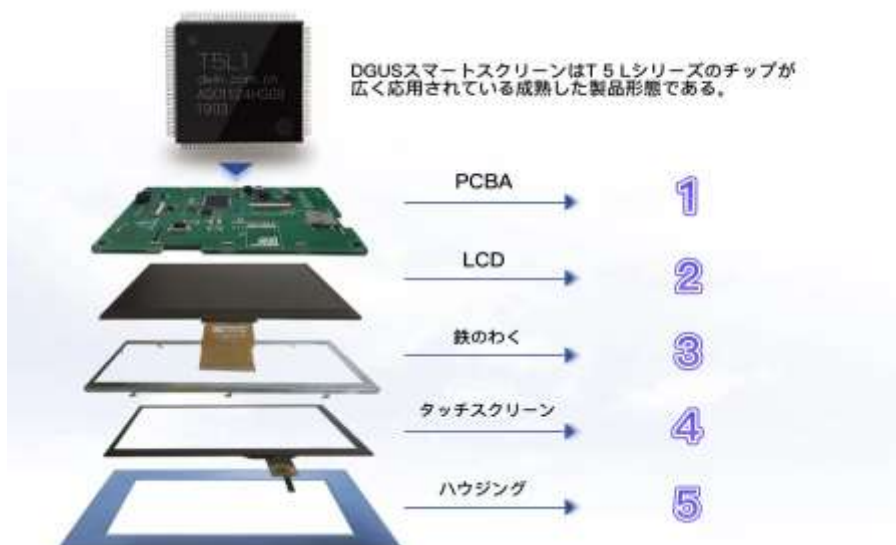

LED 脱毛器の 10.4 インチのディスプレイ

6. 治療結果（前後）



7. 3D 分解図

モジュール式の優れた構成

LT 設計システムの開発



8. エネルギーテスト (エネルギーメーターによる)



豚肉の模擬試験

Report No.: CSTW021070273

Study Verification and Signature



Protocol Number	SST2103012701B0	
Protocol Effective Date	2021-07-09	
Technical Initiation Date	2021-07-12	
Technical Completion Date	2021-07-16	
Final Report Completion Date	2021-09-02	

Personal	<u>Don Hee</u>	<u>2021-07-09</u> Date Completed
Approved	<u>Lee Jho</u> Study Director	<u>2021-07-09</u> Date Completed
Supervisory	<u>[Signature]</u> Test Facility Manager	


CCRC Huatongwei International Inspection



9. EMC 試験_01



EMC 試験_02

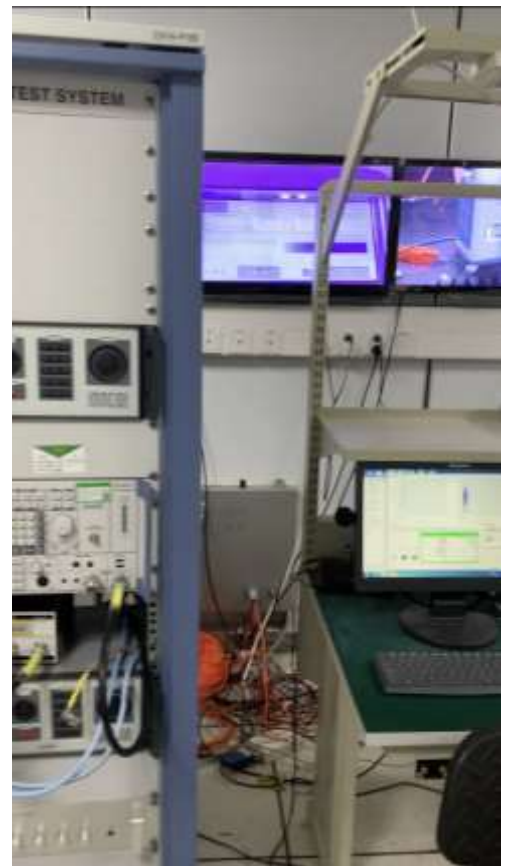

電気安全の試験_03



電気安全の試験_04



10. EpiMED_LED の重要な部品



特許取得済みのデュアルクーリングチップを備えた人間工学に基づいて設計されたハンドピース



照射能力の高い安定性とライトの寿命、速い照射スピード、高い即効性などの特徴をもつ LED。

おかげで

米国 Coherent 製 LED、お客様に 12 ヶ月または 1000 万ショットの保証のどちらか早い方のハンドピースを提供することに自信を持っています！

(通常、ライフタイムとして 2,000 万ショット)



次元の EpiMED システム



11. EpiMED_LED の技術仕様

2in1	LED
商品名	EpiMED_LED 脱毛器
スクリーン	10.4 インチ LCD タッチスクリーン
光源	LED モジュール
ライト	アメリカ製
スポットサイズ	16x24mm ²
波長	808nm
エネルギー	1-100J
連射	1-15Hz
チップ面の出力	600W (定格出力 400W); Or 900W (定格出力 600W)
機器の出力	2000W (マックス)
冷却システム	水冷、空冷、TEC 冷凍冷却装置 (-15.8℃)
タンク容量	4L
電源	100VAC, 20A max., 60Hz
重量	約 25kgs ※本体のみ
サイズ (L*W*H)	30x50x40cm
設置	卓上型

12. 保証 & 認定

通常の適切な操作で工場出荷時に2年間の保証が利用可能(2+1チャージ)。労力と材料は無料ですが、消耗品の部品はありません。

レーザーテルは、米国FDA認証、EU ISO13485、および中国のハイテク企業を持つ中国で唯一のメーカーです。



May 20, 2022

Beijing LaserTell Medical Co., Ltd.
Mr. Ray Wang
Official Correspondent
Beijing Believe-Med Technology Service Co., Ltd.
Rm.912, Building #15, XiYueHui, No.5, YiHe North Rd.,
FangShan District
Beijing, Beijing 102401
China




Re: **K220381**
Trade/Device Name: **Diode Laser Therapy Systems**
Regulation Number: 21 CFR 878.4810
Regulation Name: Laser Surgical Instrument For Use In General And Plastic Surgery And In Dermatology
Regulatory Class: Class II
Product Code: GEX
Dated: April 18, 2022
Received: April 22, 2022



13. デリバリー&エキシビション&認定&ディストリビューターデモ



14. 展示会とディストリビューターのデモ

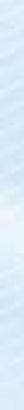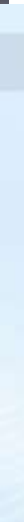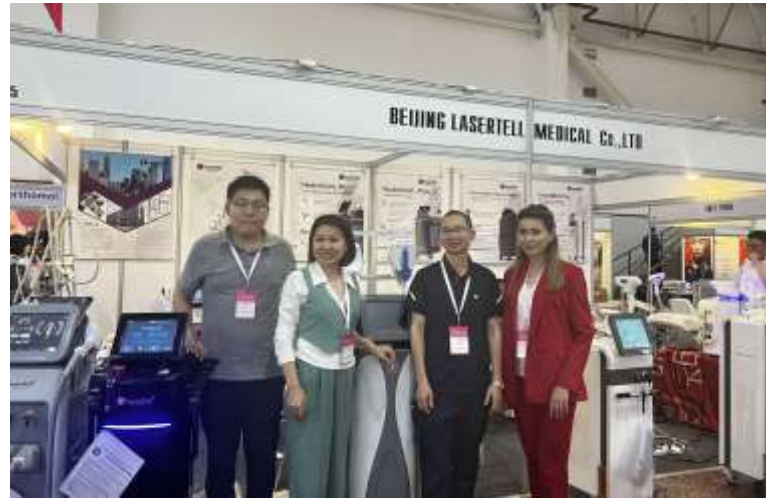

Well-recognized by Customers around 80+ Countries abroad with LaserTell Devices



15. 連絡先

Beijing LaserTell Medical Co., Ltd.

Tel: +86-10-56370026

Fax: +86-10-56370036



+86-13810 934 930 (Mob./WeChat)



lasertell



lasertell001



lasertell.info



www.LaserTell.com; www.shrlasermachine.com



info@lasertell.com



Block1, No.12, Jingsheng South 2nd Rd., JQ Science Park, Tongzhou Dist., Beijing, China.

We Share We Care

